

## Windschild SEED - Montageanleitung

Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Anbringung des Windschildes. Das Windschild eignet sich perfekt für den GreenStreet Elektroroller SEED.

### Lieferumfang:

- 1x Windschild
- 4x Schrauben
- 4x kleine Muttern
- 2x Distanzringe
- 8x kleine Dichtungen
- 4x Unterlegscheibe
- 2x Metallhalterung



### Schritt 1:

Als erstes müssen Sie die Windschildhalterung an ihrem SEED montieren. Dafür schrauben Sie die beiden Rückspiegel heraus. Anschließend bringen Sie die Metallhalterung und die Distanzringe am Rückspiegel, wie auf der Abbildung zu sehen ist, an. Nun können Sie den Spiegel wieder am Elektroroller montieren.



## Windschild SEED - Montageanleitung


### Schritt 2:

Nachdem Sie die Metallhalterung, wie auf der Abbildung zu sehen ist, an beiden Seiten angebracht haben, können Sie anfangen das Windschild zu montieren. Dafür nehmen Sie sich die kleinen Dichtungen, die kleinen Schrauben und Muttern sowie die Unterlegscheiben.



### Schritt 3:

Sie müssen als erstes das Windschild an einer Seite fixieren. Dafür stecken Sie eine Schraube durch die Unterlegscheibe sowie durch eine kleine Dichtung, nachdem Sie die Schraube durch das Windschild stecken. Von der Innenseite stecken Sie eine weitere kleine Dichtung durch die Schraube, bevor Sie die Schraube mithilfe einer muttern befestigen. Dies wiederholen Sie mit den weiteren Schrauben.

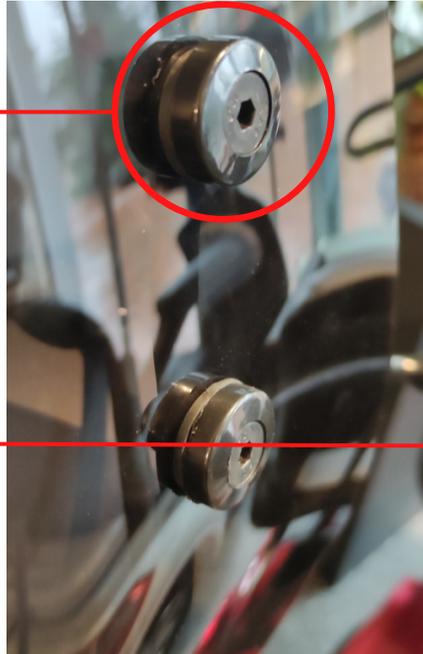

### Schritt 4:

Nachdem Sie das Windschild mit allen Schrauben fixiert haben, sollte es wie auf der Abbildung aussehen. Tipp: Fixieren Sie erstmal eine Schraube und richten Sie das Windschild richtig aus. Nun befestigen Sie die restlichen Schrauben



**Fertig!** Sie haben erfolgreich das Windschild montiert.